

## Guía de ajuste de la mascarilla AirFit P10




- Apoye las almohadillas en la nariz, recuerde que el indicador de tamaño de la almohadilla debe estar en la base y usted debe poder ver los indicadores de orientación izquierdo (L, left) y derecho (R, right).



- Estire la correa inferior alrededor de la nuca.
- La correa superior debe apoyarse con comodidad sobre la parte superior de la cabeza.



- Sostenga la correa inferior para ponerse el arnés sobre la cabeza.

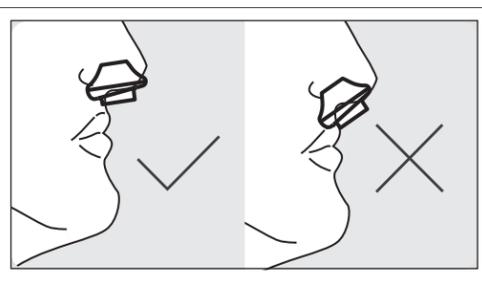

- Aleje la mascarilla de la cara y luego vuelva a apoyarla.
- Compruebe que las almohadillas nasales se aseguren con firmeza en las narinas y que ambas almohadillas estén derechas



- Por último, conecte el extremo del tubo de la mascarilla en el circuito de aire del dispositivo.
- Encienda el dispositivo: su mascarilla está lista para usar.



- Si es necesario realizar un ajuste, solo separe las correas inferior y superior para aflojarlas o júntelas para ajustarlas.

**Nota:** Consulte las instrucciones completas para el usuario en el manual del usuario de la mascarilla AirFit P10.

Rx Only

\*Valores declarados de emisión dual numerada de ruido (con incertidumbre 3dB) de conformidad con ISO 4871.

1 Según las pruebas de ResMed Ref.D000-0201; eLB0798-206. 2 Estudio clínico de ResMed de comparación de las mascarillas AirFit P10 y Swift FX Ref.D629-117. Datos objetivos de ResMed (presión, fuga, uso, IAH).

ResMed Corp San Diego, CA, EE. UU. +1 858 836 5000 ó 1 800 424 0737 (llamada gratuita), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia +61 (2) 8884 1000 ó 1 800 658 189 (llamada gratuita). Para obtener información acerca de otras sucursales de ResMed en todo el mundo, consulte el sitio web ResMed.com. AirFit, QuickFit y QuietAir son marcas de ResMed Ltd Swift es una marca de ResMed Ltd, y está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

©2014 ResMed. Las especificaciones se pueden modificar sin previo aviso. 1016853/1 2014-01



## Una mascarilla más silenciosa justa para su sueño.

La mascarilla de almohadillas nasales AirFit™ P10 integra la nueva serie AirFit de ResMed: el ajuste perfecto para usted. Esta es nuestra mascarilla más silenciosa a la fecha, le ofrece la confiabilidad y el rendimiento de la mascarilla Swift™ FX en un diseño que es aproximadamente 50% más ligero y 50% más silencioso.<sup>1</sup> Además, un estudio descubrió que los pacientes que usan la mascarilla AirFit P10 duermen más de 40 adicionales cada noche.<sup>2</sup>

### Más silenciosa

Ventilación de malla entretejida QuietAir™ hace que esta tecnología sea la mascarilla más silenciosa de ResMed a la fecha y promueve la aceptación de los pacientes.

### Más ligera


50% más ligera que nuestra mascarilla de almohadillas nasales más popular,<sup>1</sup> ofrece a los pacientes la comodidad de un mejor descanso por las noches.

### Más fácil de usar

Las almohadillas nasales con cierre de mosquetón tienen los tamaños codificados por color y la orientación izquierda/derecha visible para que colocarse la mascarilla sea rápido y sencillo.

# Más de 40 minutos adicionales de descanso, cada noche

En un estudio clínico reciente descubrimos que los pacientes dormían más de 40 minutos adicionales cada noche al usar la mascarilla AirFit P10 de ResMed.<sup>2</sup> Eso representa casi cinco horas a la semana de sueño adicional y colabora a que los pacientes cumplan con su terapia de sueño.

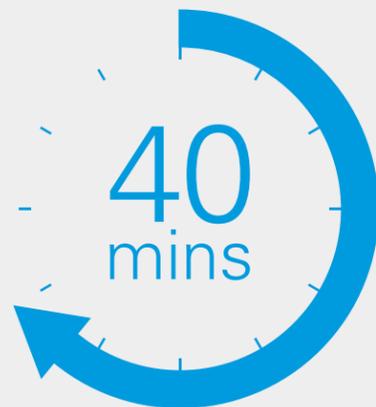

## AirFit P10 Características y beneficios

**Tecnología de pared doble** con efecto trampolín para sellar al contacto y dispersar el aire suavemente a la nariz.

**Almohadillas nasales con cierre de mosquetón** ofrecen un montaje sin esfuerzo, están codificadas por color para reconocer su tamaño y muestran la orientación izquierda/derecha para asegurar que los pacientes se pongan la mascarilla correctamente.


**Innovador tubo flexible** es ultraligero y flexible y, a la vez, de alta duración, por lo que ofrece a los pacientes total libertad de movimiento sin comprometer el sellado.

**Ventilación de malla entretejida QuietAir** dirige silenciosamente el aire exhalado para que los pacientes y sus parejas apenas lo noten.

**Arnés elástico QuickFit™** con exclusivo diseño de correas divididas para ofrecer estabilidad y ajuste con un mínimo contacto facial.

**La AirFit P10 para Ella** tiene un diseño especial para mujeres, es de menor tamaño y está diseñada para el contorno facial femenino en colores y con detalles elegantes y exclusivos.

## Componentes de la mascarilla AirFit P10

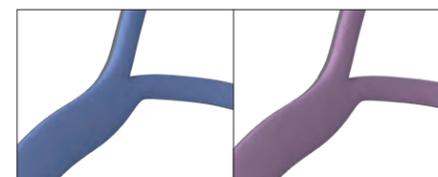

Arnés elástico QuickFit  
**62935**

Arnés elástico QuickFit para Ella  
**62936**

Sistema de armazón (incluye el armazón y las almohadillas)  
**62920 (XP)**  
**62921 (P)**  
**62922 (M)**  
**62923 (G)**

Armazón

Almohadillas



**3-partes sencillez** hace que la mascarilla AirFit P10 sea un 50% más ligera que las principales mascarillas de almohadillas.<sup>1</sup>



- XS** Extra pequeña
- S** Pequeña
- M** Mediana
- L** Grande

### Códigos de producto

Sistema completo AirFit P10*	<b>62900</b>
Sistema completo AirFit P10 para Ella*	<b>62910</b>

\* Se incluyen almohadillas S, M y L en el envase de la mascarilla.  
\* Se incluyen almohadillas XS, S y M en el envase de la mascarilla..

**Nota:** Para obtener más información, consulte el manual del usuario de la mascarilla AirFit P10.